

	<b>ALLEGATO 3</b> <b>SCHEDA DI CONSEGNA D.P.I.</b> <b>(mascherine)</b>	<b>PRO Covid-19</b>
		<b>Rev. 0</b> <b>(23 aprile 2020)</b>
		Pagina 1 di 1

### ALLEGATO 3 – SCHEDA DI CONSEGNA D.P.I. (mascherine)

In data \_\_\_\_\_, io sottoscritto Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato:

- mascherine (tipo chirurgiche) FFP1 - CE EN 149;  
 semimaschera facciale filtrante FFP2 - CE EN 149;  
 semimaschera facciale filtrante FFP3 - CE EN 149.

per uso personale.

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative che lo portino ad una distanza inferiore ad 1 m.

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve. Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE			
			
<p><b>Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• facciale sotto al mento;</li> <li>• elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie;</li> <li>• elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>NON ATTORCIGLIARE</b></p>	<p>Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .</p>	
			
<p>Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso</p>	<p>Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .</p>	<p>Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro</p>	

Firma del lavoratore

---